

LUCAS® 3 Thoraxkompressionssystem

Problem gelöst! Das LUCAS Gerät passt auch bei großen und schweren Patienten!

Gewicht:

82 kg

Größe:

183 cm




Gewicht:

150 kg

Größe:

196 cm

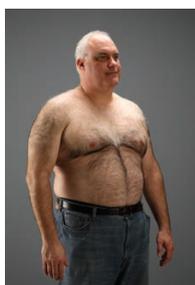

Gewicht:

145 kg

Größe:

178 cm



Die richtige Platzierung ist auf dem oberen Brustkorb

Gehen Sie nicht davon aus, dass das LUCAS Thoraxkompressionssystem nicht für größere und schwerere Patienten geeignet ist. Viele schwere Patienten tragen ihr Gewicht im mittleren Körperbereich. Wenn das LUCAS ordnungsgemäß angelegt wird, liegt es auf dem oberen Brustkorb oder Sternum mit ausreichend Platz für den Kompressor, um richtlinienkonforme Kompressionen zu verabreichen. Solange das Gerät an der Rückenplatte einrastet und der Saugnapf den Brustkorb des Patienten nicht bereits in der Ausgangsposition eindrückt, wird das Gerät ordnungsgemäß funktionieren.

Zur Behandlung geeignete Patienten:

- Sternumhöhe von 17 - 30,3 cm
- Maximale Brustkorbbreite: 45 cm

Die Verwendung des LUCAS Geräts hängt nicht vom Gewicht des Patienten ab.

LUCAS® 3 Thoraxkompressionssystem

Problem gelöst! Das LUCAS Gerät passt auch bei großen und schweren Patienten!



Gewicht:

145 kg

Größe:

178 cm

Physio-Control ist jetzt Teil von Stryker.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Physio-Control Gebietsleiter für weitere Informationen oder besuchen Sie unsere Website

Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
www.physio-control.com

**Physio-Control Operations
Netherlands B.V.**
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Netherlands
Tel +31 (0)43 3620008
Fax +31 (0)43 3632001

**Physio-Control
Germany Sales GmbH**
Stresemannallee 4b
D-41460 Neuss
Tel +49 (0)2131 6617 000
Fax +49 (0)2131 6617 251
www.lifepak.de

**Physio-Control
Austria Sales GmbH**
Simmeringer Hauptstraße 24
A-1110 Wien
Tel +43 (0)1 74040 2866
Fax +43 (0)1 74040 2867
www.physio-control.at

**Physio-Control
Switzerland Sales GmbH**
c/o Intertrust Service (Schweiz) AG
Alpenstraße 15
CH-6304 Zug
Tel 0800 00 66 33 (kostenlos)
Fax 0800 00 66 44 (kostenlos)
www.physio-control.ch

 **Jolife AB**, Scheelevägen 17, Ideon Science Park, SE-223 70 LUND, Sweden

©2018 Physio-Control, Inc. Nicht alle Produkte und Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
GDR 3328901_C